

**Programa de gestão da Qualidade
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP**



Setor: SUSADT /CME

Identificação: POP 009

Assunto: Armazenamento e controle dos artigos, após processos de esterilização ou desinfecção química

Versão: 01

Folha Nº: 1/3

1. OBJETIVO

Padronizar o processo de armazenamento de artigos a fim de manter a integridade da esterilização e do conteúdo, bem como facilitar a localização/identificação dos materiais.

2. PROCEDIMENTO

Ordem	Ação/Descrição	Agente Executor
1	Conferir a integridade das embalagens e rótulos.	Técnico em Enfermagem
2	Proteger os artigos de contaminação, danos físicos e perda durante o transporte.	Técnico em Enfermagem
3	Estocar os artigos esterilizados nos cestos, armários ou prateleiras de acordo com a sua identificação, sem contato com a parede.	Técnico em Enfermagem
4	Organizar os artigos e considerar como contaminados os pacotes que caírem no chão ou que apresentar a embalagem violada e/ou danificada (furos, rasgos) bem como os que estiverem comprimidos, torcidos ou úmidos.	Técnico em Enfermagem
5	Posicionar os pacotes com data de esterilização mais antiga à frente daqueles com data mais recente.	Técnico em Enfermagem
6	Guardar e distribuir os artigos obedecendo à ordem cronológica de seus lotes de esterilização, ou seja, liberar os mais antigos antes dos mais novos.	Técnico em Enfermagem
7	Efetuar a inspeção diária dos artigos estocados para a verificação de qualquer degradação visível e o prazo de validade.	Técnico em Enfermagem
8	Manter o setor organizado e o controle dos materiais em estoque, registrando diariamente a quantidade de materiais.	Técnico em Enfermagem
9	Atender a solicitação de requisição de materiais conforme REG 046 SUCME Requisição de materiais no CME.	Técnico em Enfermagem
10	Verificar os prazos de validade dos artigos, identificando em sua lateral os materiais a vencer na semana (iniciando no domingo), retirar os vencidos e encaminhá-los para expurgo para iniciarem novo processo.	Técnico em Enfermagem

Programa de gestão da Qualidade PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP		 GOVERNO DE GOIÁS SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE SUS+	 HCAMP HOSPITAL DE CAMPANHA PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS PORTARIAS ES - GO 507/2020
Setor: SUSADT /CME		Identificação: POP 009	
Assunto: Armazenamento e controle dos artigos, após processos de esterilização ou desinfecção química		Versão: 01	
		Folha Nº: 2/3	

11	Verificar diariamente a temperatura e umidade do ambiente da área de armazenamento de artigos esterilizados, registrando os valores no REG 036 Controle de temperatura e umidade da CME, nos períodos matutino e vespertino.	Técnico em Enfermagem / Enfermeira
----	--	---------------------------------------

3. SIGLAS

- Não aplicável.

4. CONTROLE DE REGISTROS

REG 036 Controle de temperatura e umidade da CME.

REG 046 Requisição de materiais no CME.

5. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

1. SOBECC – Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização. Práticas Recomendadas SOBECC. 6 ed. São Paulo: SOBECC, 2013.

2. BRASIL. Resolução-RDC nº 15, de 15 de março de 2012. Diário Oficial da União. Brasília, 19 de Março de 2012.

3. GONÇALVES, Cristina Vieira. POP 280 - Armazenamento e controle dos artigos, após processos de esterilização ou desinfecção química. HUGOL. Versão 03. 20. mai. 2019.

6. ANEXOS

- Não aplicável.

**Programa de gestão da Qualidade
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP**



Setor: SUSADT /CME

Identificação: POP 009

Assunto: Armazenamento e controle dos artigos, após processos de esterilização ou desinfecção química

Versão: 01

Folha Nº: 3/3

Elaborado por:

Murichaine Francine Marques

27/03/2020
Data

Revisado por:

Anamar Ferreira Rosa

Aprovado para uso:

Guillermo Socrates

20/08/2021
Data