





Sistema de Gestão da Qualidade PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP		 GOVERNO DE GOIÁS SECRETARIA DE ESTADOS E SAÚDE SUS	 HCAMP HOSPITAL DE CAMPANHA PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS PORTARIA SES - GO 507/2020
Setor: CME		Identificação: POP 012	
Processo: Limpeza manual e esterilização dos artigos de assistência respiratória		Versão: 01	
		Folha Nº: 1/3	

1. OBJETIVO

Padronizar o processo de limpeza de artigos utilizados na assistência respiratória, tais como nebulizadores, circuitos respiratório e de suporte anestésico.

2. PROCEDIMENTO

Ordem	Ação/Descrição	Agente Executor
1	Paramentar.	Técnico em Enfermagem
2	Receber os materiais de assistência ventilatória das unidades consumidoras.	Técnico em Enfermagem
3	Conferir a integridade dos artigos e se os mesmos estão completos, se danificados comunicar a enfermeira do CME e receber somente após entrega do REG 047 SUCME Registro de não conformidade na entrega dos materiais dos setores.	Técnico em Enfermagem
4	Desconectar cuidadosamente as válvulas, diafragmas, copos reservatórios, máscaras, conexões, balões de ventilação e traqueias, a fim de evitar perdas e facilitar limpeza.	Técnico em Enfermagem
5	Imergir os artigos em recipiente com água e sabão neutro líquido de 20 a 30 minutos.	Técnico em Enfermagem
6	Lavar os artigos com escovas e/ou esponjas não abrasivas adequadas e enxaguar em água corrente.	Técnico em Enfermagem
7	Secar os artigos cuidadosamente com compressas e/ou ar comprimido, montá-los e após inspeção visual encaminhar para processo	Técnico em Enfermagem

Sistema de Gestão da Qualidade PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP		 GOVERNO DE GOIÁS SECRETARIA DE ESTADOS SAUDES SUS+	 HCAMP HOSPITAL DE CAMPANHA PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS PORTARIA SES - GO 507/2020
Setor: CME		Identificação: POP 012	
Processo: Limpeza manual e esterilização dos artigos de assistência respiratória		Versão: 01	
		Folha Nº: 2/3	

	correspondente.	
8	Encaminhar ao Enfermeiro do setor os produtos que estejam incompletos para providências.	Técnico em Enfermagem

3. SIGLAS

CME: Centro de Material e Esterilização.

4. CONTROLE DE REGISTROS

REG 047 SUCME Registro de não conformidade na entrega dos materiais do setores

5. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

1. SOBECC – Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anes- tésica e Centro de Material e Esterilização. Práticas Recomendadas SOBECC. 6 ed. São Paulo: SOBECC, 2017.

2. GONÇALVES, Cristina Vieira. POP 284 - Limpeza manual e esterilização dos artigos de assistência respiratória. HUGOL. Versão 04. 03. jun. 2019.

6. ANEXOS

- Não aplicável.

Sistema de Gestão da Qualidade
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP



Setor: CME

Identificação: POP 012

Processo: Limpeza manual e esterilização dos artigos de assistência respiratória

Versão: 01

Folha Nº: 3/3

Elaborado por:

Murichaine Francine Marques

15/05/2020
Data

Revisado por:

Anamar Ferreira Rosa
Murichaine Francine Marques

Aprovado para uso:

Guillermo Sócrates

20/08/2021
Data