#### 

## 1. OBJETIVO

Padronizar o processo de limpeza manual das traqueias dos ventiladores.

## 2. PROCEDIMENTO

Ordem	Ação/Descrição	Agente Executor
1	Higienizar as mãos e paramentar-se.	Técnico em Enfermagem
2	Receber os materiais mediante apresentação do REG 045 - Entrega de materiais no CME, preenchido corretamente e conferir integridade da válvula no ato do recebimento.	Técnico em Enfermagem
3	Receber os materiais danificados somente com autorização da enfermeira responsável do plantão e após preenchimento do REG 047 Registro de não conformidade na entrega dos materiais dos setores.	Técnico em Enfermagem
4	Realizar a pré-limpeza manual do artigo utilizando sabão neutro líquido e escovas adequadas para cada lúmen de traqueia.	Técnico em Enfermagem
5	Imergir totalmente as traqueias na solução com sabão neutro líquido e deixar de 20 a 30 minutos, preenchendo todo lúmen.	Técnico em Enfermagem
6	Enxaguar abundantemente em água corrente.	Técnico em Enfermagem
7	Inspecionar a eficácia da limpeza e se necessário retornar ao processo de limpeza.	Técnico em Enfermagem
8	Encaminhar para bancada do preparo para ser embalada em saco plástico com o conjunto de traqueia devidamente montada e identificada.	Técnico em Enfermagem
9	Conferir a integridade das embalagens e rótulos quando do retorno da empresa.	Técnico em Enfermagem
10	Estocar os artigos esterilizados nos cestos, armários ou prateleiras correspondentes a sua identificação, sem contato com a parede.	Técnico em Enfermagem
11	Verificar diariamente a temperatura e umidade do ambiente, registrando os valores no REG 036 Controle de Temperatura e Umidade nos períodos matutino, vespertino e noturno.	Técnico em Enfermagem / Enfermeiro

# Sistema de Gestão da Qualidade PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP





Setor: CME Identificação: POP 014

Assunto: Processamento das traqueias dos Versão: 01

ventiladores Folha N°: 2/3

#### 3.SIGLAS

CME - Centro de Material e Esterilização.

### 4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- SOBECC Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização. Práticas Recomendadas SOBECC. 6 ed. São Paulo: SOBECC, 2017.
- 2. BRASIL. Resolução RDC nº 15, de 15 de março de 2012. Diário Oficial da União. Brasília, 19 de Março de 2012.
- 3. GONÇALVES, Cristina Vieira. POP 292 Processamento das traqueias dos ventiladores. HUGOL. Versão 04. 20. mai. 2019.

#### 5. CONTROLE DE REGISTROS

- REG 036 Controle de temperatura e umidade no CME
- REG 047 Registro de não conformidade na entrega dos materiais dos setores

#### 6. ANEXOS

- Não aplicável.

# Sistema de Gestão da Qualidade PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP





Setor: CME Identificação: POP 014

Assunto: Processamento das traqueias dos Versão: 01

ventiladores Folha Nº: 3/3