

Sistema de Gestão da Qualidade PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP		 GOVERNO DE GOIÁS SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE SUS+	 HCAMP HOSPITAL DE CAMPANHA PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS PORTARIA SES - GO 507/2020
Setor: CME		Identificação: POP 016	
Assunto: Processamento dos Ambús		Versão: 01	
		Folha Nº: 1/2	

1. OBJETIVO

Padronizar a técnica de limpeza, desinfecção e esterilização dos Ambus.

2. PROCEDIMENTO

Ordem	Ação/ Descrição	Agente Executor
1	Realizar higienização das mãos.	Técnico em Enfermagem
2	Paramentar-se conforme o POP 019 - Rotina para Adentrar na Área do CME.	Técnico em Enfermagem
3	Receber os materiais mediante o preenchimento do REG 045 Entrega de materiais no CME e conferir a integridade no ato do recebimento.	Técnico em Enfermagem
4	Receber os materiais danificados somente com autorização da enfermeira responsável do plantão e após preenchimento do REG 047 Registro de não conformidade na entrega dos materiais dos setores.	Técnico em Enfermagem
5	Desmontar o ambu (retirar a máscara e conexões).	Técnico em Enfermagem
6	Imergir o ambu e seus componentes em água com sabão neutro líquido.	Técnico em Enfermagem
7	Lavar externamente e internamente, com solução de água e sabão neutro líquido, usando a escova de limpeza apropriada.	Técnico em Enfermagem
8	Enxaguar abundantemente por dentro e por fora em água corrente, bem como suas conexões.	Técnico em Enfermagem
9	Secar com compressas e jato de ar comprimido.	Técnico em Enfermagem
10	Encaminhar para o setor de preparo os materiais montados, conferindo a sua integridade.	Técnico em Enfermagem
11	Realizar o teste de insuflação e ventilação para todos os ambus antes de conectar a máscara.	Técnico em Enfermagem
12	Envolver em embalagem plástica para encaminhar a empresa processadora.	Técnico em Enfermagem

Sistema de Gestão da Qualidade PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP		 GOVERNO DE GOIÁS SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE SUS+	 HCAMP HOSPITAL DE CAMPANHA PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS PORTARIA SES - GO 507/2020
Setor: CME		Identificação: POP 016	
Assunto: Processamento dos Ambús		Versão: 02	
		Folha Nº: 2/2	

3. SIGLAS

CME - Centro de Material e Esterilização

4. CONTROLE DE REGISTROS

POP 019 - Rotina para Adentrar na Área do CME

REG 047 - Registro de não conformidade na entrega dos materiais dos setores;

REG 045 - SUCME Entrega de materiais no CME

5. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

1. SOBECC – Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anes- tésica e Centro de Material e Esterilização. Práticas Recomendadas SOBECC. 6 ed. São Paulo: SOBECC, 2017.

2. GONÇALVES, Cristina Vieira. POP 299 - Processamento dos ambus. HUGOL. Versão 03. 20. mai. 2019.

6. ANEXOS

- Não aplicável.

Elaborado por: Murichaine Francine Marques 15/05/2020 Data	Revisado por: Anamar Ferreira Rosa	Aprovado para uso: Guillermo Socrates Pinheiro de Lemos 20/08/2021 Data
--	--	--