

**Sistema de Gestão da Qualidade
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP**



Setor: CME

Identificação: POP 017

Assunto: Recebimento e limpeza dos instrumentais e dos materiais no expurgo

Versão: 01

Folha Nº: 1/4

1. OBJETIVO

Padronizar o horário de recebimento e limpeza dos instrumentais e dos demais materiais no setor expurgo.

2. PROCEDIMENTO

Ordem	Ação/Descrição	Agente Executor
1	Realizar limpeza das bancadas (com água e detergente enzimático) e desinfecção (com pano multi uso e desinfetante hospitalar fazendo fricção unidirecional).	Técnico em Enfermagem
2	Verificar os materiais de trabalho e sinalizar quando houver falta de algum; preparar solução do detergente enzimático de acordo com orientações do fabricante e realizar a troca do mesmo sempre que necessário.	Técnico em Enfermagem
3	Receber os materiais conforme horário anexado no setor, realizando conferência da sua integridade e funcionalidade, se danificado, comunicar a supervisão e receber somente mediante a autorização da enfermeira do plantão, e com o devido preenchimento do REG 047 Registro de não conformidade na entrega dos materiais dos setores.	Técnico em Enfermagem
4	Separar os materiais cuidadosamente a fim de evitar danos como quedas ou acidente ocupacional, atentando para corpo estranho (lâmina de bisturi, agulhas e etc.).	Técnico em Enfermagem
5	Realizar pré-lavagem dos materiais com água filtrada e solução detergente enzimático (diluído conforme orientações do fabricante); utilizando escovas e esponjas compatíveis a cada material a ser processado.	Técnico em Enfermagem
6	Imergir os instrumentais abertos na solução de água e detergente enzimático para remoção dos resíduos de matéria orgânica. Dar atenção especial para as articulações, serrilhas e cremalheiras.	Técnico em Enfermagem
7	Desmontar o instrumental sempre que possível e friccionar os artigos sob água para evitar aerossóis de microrganismo.	Técnico em Enfermagem
8	Enxaguar rigorosamente os instrumentais em água corrente filtrada, abrindo e fechando as articulações até remover a sujeira e o detergente enzimático.	Técnico em Enfermagem

**Sistema de Gestão da Qualidade
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP**



Setor: CME

Identificação: POP 017

Assunto: Recebimento e limpeza dos instrumentais e dos materiais no expurgo

Versão: 01

Folha Nº: 2/4

9	Encaminhar os artigos críticos para o processo automatizado escolhido conforme tipo do material (manual ou lavadora ultrassônica).	Técnico em Enfermagem
10	Priorizar os artigos mais críticos (pinças cirúrgicas) no processo da lavadora ultrassônica e respiratórios (látex e traqueias).	Técnico em Enfermagem
11	Colocar o instrumental cirúrgico de modo organizado nas bandejas perfuradas, para permitir que a solução ocupe todos os espaços dos instrumentais.	Técnico em Enfermagem
12	Acondicionar os materiais pesados e maiores, de maneira que estes fiquem abaixo dos pequenos e leves.	Técnico em Enfermagem
13	Utilizar lente de aumento disponibilizado no setor, a fim de conferir a limpeza dos artigos, assegurando o processo de adequada higienização.	Técnico em Enfermagem
14	Repetir o processo em caso de permanência de sujidade após o processo.	Técnico em Enfermagem
15	Secar as peças com compressa estéril e ou ar comprimido, em toda a sua extensão, dando especial atenção para as articulações, serrilhas e cremalheiras, se necessário encaminhar para secadora.	Técnico em Enfermagem
16	Desprezar solução ao término do expediente, lavar e secar as cubas.	Técnico em Enfermagem
17	Lavar e secar pia e bancada.	Técnico em Enfermagem
18	Manter ambiente limpo e em ordem.	Técnico em Enfermagem

3. SIGLAS

- Não aplicável.

4. CONTROLE DE REGISTROS

REG 047 - Registro de não conformidade na entrega dos materiais dos setores

Sistema de Gestão da Qualidade PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP		 GOVERNO DE GOIÁS <small>SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE</small>	 HCAMP HOSPITAL DE CAMPANHA PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS <small>PORTARIA SES - GO 507/2020</small>
Setor: CME		Identificação: POP 017	
Assunto: Recebimento e limpeza dos instrumentais e dos materiais no expurgo		Versão: 01	
		Folha Nº: 3/4	

5. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

1. SOBECC – Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização. Práticas Recomendadas SOBECC. 6 ed. São Paulo: SOBECC, 2013.

2. BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Exposição a Materiais Biológicos. Brasília, 2006. 76p.

3. APECIH – Associação Paulista de Estudos e Controle de Infecção Hospitalar. Limpeza, Desinfecção de Artigos e Áreas Hospitalares e Antissepsia. 2ª Edição revisada, 2000.

4. GONÇALVES, Cristina Vieira. POP 285 - Recebimento e limpeza dos instrumentais e dos materiais no expurgo. HUGOL. Versão 05. 20. mai. 2019.

6. ANEXOS

- Não aplicável.

Elaborado por: Murichaine Francine Marques <u>15/05/2020</u>	Revisado por: Murichaine Francine Marques	Aprovado para uso: Guillermo Socrates <u>20/08/2021</u>
--	---	---

**Sistema de Gestão da Qualidade
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP**



Setor: CME

Identificação: POP 017

Assunto: Recebimento e limpeza dos instrumentais e dos materiais no expurgo

Versão: 01

Folha Nº: 4/4

Data

Anamar Ferreira Rosa

Data